

GETINGE
GETINGE GROUP

**GETINGE GAMME K
STERILISATEURS DE TABLE**



*Toujours à vos côtés

Always with you*


HIGH-SPEED STERILIZATION™

QUI ALLIE CAPACITÉ ET EFFICACITÉ



Les stérilisateur Getinge de la gamme K sont des modèles de table exceptionnellement rapides et dotés d'une grande capacité. En fait, un seul stérilisateur fait le travail de deux ! En 25 minutes, vous pouvez stériliser jusqu'à 10 plateaux à l'aide du programme du cycle B. Cela équivaut à 20 plateaux par heure. Et si vous n'avez besoin que d'un programme Flash pour des instruments non emballés, cela ne prend que 9 minutes ! Cela signifie que la rotation des instruments est plus rapide et que le nombre d'instruments nécessaires à votre clinique est réduit de manière considérable.

Les stérilisateur Getinge de la gamme K disposent de chambres rectangulaires qui utilisent presque toute la totalité du volume lors de la stérilisation des plateaux et des cassettes. Dans une chambre ronde, 25% du volume représente de l'espace perdu. Lorsqu'il s'agit de comparer la capacité en plateaux, le volume en litre n'est pas forcément déterminant.

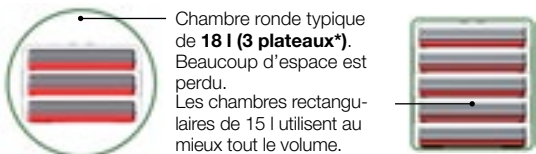

Jusqu'à 10 ans de garantie

Nous fabriquons des stérilisateur depuis plus de 50 ans ; par conséquent, nous connaissons bien les performances remarquables de nos machines. C'est pourquoi Getinge peut proposer des garanties, elles aussi, exceptionnelles : garantie générale de deux ans, garantie de cinq ans sur la pompe du système d'aspiration et garantie de dix ans sur la chambre et les éléments chauffants du générateur de vapeur.



Cycle B éprouvé

La norme EN13060, en application depuis septembre 2004, est la norme européenne pour les petits stérilisateur, qui exige que ceux-ci puissent stériliser sous vide, selon le procédé B, des instruments creux, emballés et des textiles. Les stérilisateur Getinge de la gamme K répondent à ces critères depuis 1989.

* Plateau ou cassette dentaire, 38 mm de haut.

Porte coulissante sécurisée

Saviez-vous que les portes de stérilisateur sont soumises à une pression d'une tonne? Sur les portes de stérilisateur conventionnelles, cette pression considérable est supportée par des charnières et des verrous. Les stérilisateur Getinge de la gamme K proposent une solution plus sûre, à savoir une porte coulissante intégrée dans des rails robustes.

Cette conception protège également l'utilisateur de tout contact avec la surface intérieure chaude de la porte et permet de pallier les problèmes d'ouverture de la porte lorsque (comme c'est souvent le cas) l'espace devant le stérilisateur est limité.

Facilité d'emploi et d'entretien

La convivialité et la simplicité de la maintenance sont d'autres avantages importants des stérilisateur Getinge de la gamme K :

- Simplicité d'utilisation : il suffit de charger le stérilisateur, de fermer la porte et d'appuyer sur le bouton « Marche ».
- Maintenance aisée et peu onéreuse grâce à une conception unique basée sur un nombre limité de composants.
- Réservoir d'eau en acier inoxydable facilement accessible pour le nettoyage, ce qui permet d'éviter toute formation de biofilm non hygiénique.
- Faible consommation d'eau déminéralisée – juste 0,4 litre pour un cycle standard.
- Raccordement simple à l'alimentation en eau.
- Cycle de documentation par l'intermédiaire d'une imprimante, d'une unité de stockage USB ou d'un port série pour PC.

Des modèles adaptés à tous les besoins

Les stérilisateur Getinge de la gamme K sont répartis en trois modèles dont les profondeurs de chambre et les capacités de chargement diffèrent. Que vous ayez une clinique ou un petit cabinet dentaire, il existe un modèle qui vous convient.

STERILISATEURS GETINGE K5+/K7+

JUSQU'À 20 PLATEAUX & 20 MINI-PLATEAUX PAR HEURE

Programme standard en 25 minutes

Le cycle B ne dure que 25 minutes.

Programme spécial en 15 minutes

Le programme dental special (cycle S) pour 10 pièces à main dentaires emballées s'effectue en 15 minutes.

Programme Flash en 9 minutes

Le programme Flash (cycle N) pour les instruments solides non emballés ne dure que 9 minutes !

Capacité et productivité supérieures

La chambre rectangulaire peut être utilisée de façon optimale pour une capacité de chargement maximale, qui s'avère parfaite pour les plateaux dentaires, les cassettes et autres supports. En une heure, vous pouvez stériliser jusqu'à 20 plateaux d'instruments avec un stérilisateur Geringe K5+. Le stérilisateur Geringe K7+, plus profond de 100 mm, permet de stériliser 20 plateaux d'instruments et 20 mini-plateaux dans le même laps de temps !

Un stérilisateur avec une telle productivité peut faire le travail de deux ! Les instruments sont stérilisés et prêts à l'emploi en un temps très court. Cela signifie que vous avez besoin de moins d'instruments et que vous pouvez diminuer vos investissements, d'où une meilleure rentabilité.

Pour les cabinets de fréquentation moyenne

Les stérilisateurs Geringe K5+ et K7+ sont parfaits pour les cabinets/cliniques de fréquentation moyenne avec une utilisation et une rotation d'instruments stérilisables importantes.


La plus grande profondeur de la chambre du stérilisateur Geringe K7+ fait qu'il convient également à ceux qui doivent stériliser des instruments plus longs comme, par exemple, des endoscopes et des instruments spécifiques utilisés pour les implants chirurgicaux.



Les modèles K5+ et K7+ se déclinent en deux versions, avec le nouveau boîtier en acier inoxydable ou avec le boîtier blanc.

Voici ce que le Geringe K5+ peut stériliser en une heure :

20 plateaux

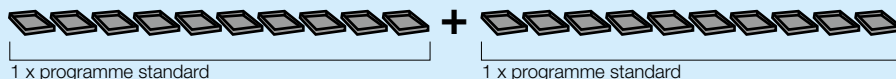


1 x programme standard

1 x programme standard

Voici ce que le Geringe K7+ peut stériliser en une heure :

20 plateaux +
20 miniplateaux

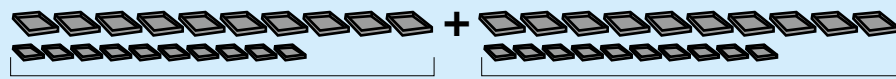

1 x programme standard

1 x programme standard

STERILISATEUR GETINGE K3+

12 PLATEAUX MAXIMUM PAR HEURE

Programme standard en 25 minutes

Le cycle B ne dure que 25 minutes.

Programme spécial en 15 minutes

Le programme dental special (cycle S) pour 10 pièces à main dentaires emballées s'effectue en 15 minutes.

Programme Flash en 9 minutes

Le programme Flash (cycle N) pour les instruments solides non emballés ne dure que 9 minutes !

Capacité et productivité supérieures

La chambre rectangulaire peut être utilisée de façon optimale pour une capacité de chargement maximale, qui s'avère parfaite pour les plateaux dentaires, les cassettes et autres supports. En une heure, vous pouvez stériliser jusqu'à 12 plateaux d'instruments.

Les stérilisateurs K3+ offrent une productivité plus élevée par rapport aux stérilisateurs conventionnels de la même catégorie. Les instruments sont stérilisés et prêts à l'emploi dans un délai très rapide. Cela signifie que vous avez besoin de moins d'instruments et que vous pouvez diminuer vos investissements, d'où une meilleure rentabilité.

Pour les cabinets de faible fréquentation

Les stérilisateurs Getinge K3+ sont parfaits pour les cabinets/cliniques de petite et moyenne fréquentation ayant une rotation d'instruments stérilisables normale et rapide.

La profondeur de la chambre est la même que celle des stérilisateurs K5+, mais la hauteur, et par conséquent la capacité, sont légèrement inférieures.




Le modèle K3+ se décline maintenant en deux versions, avec le nouveau boîtier en acier inoxydable ou avec le boîtier blanc.



Getinge K3+
profondeur : 345 mm




Getinge K5+
profondeur : 345 mm

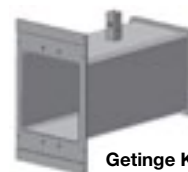

Getinge K7+
profondeur : 445 mm

Voici ce que le Getinge K3+ peut stériliser en une heure :

12 plateaux

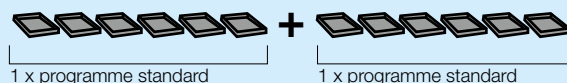


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STERILISATEURS GETINGE DE LA GAMME K		
Programmes standard		
Type de procédé	Programmes	Durée du procédé
Cycle B	134°C emballé	~25 min
Cycle B	121°C emballé	~39 min
Cycle B	134°C textile	~29 min
Cycle B	134°C prion	~38 min
Cycle S	134°C dental special*	~15 min
Cycle N	134°C flash	~9 min
Programmes de test : Bowie & Dick, test de fuite		

* Pour 10 pièces à main dentaires emballées maximum.

Programmes optionnels		
Cycle liquide	121°C liquide	~90 min
Défini par client	121°C - 134°C	

La durée des cycles dépend de la charge et est donnée à titre indicatif. Elle correspond à un traitement complet, séchage compris, en charge moyenne. Pour plus de détails, reportez-vous aux spécifications du produit.

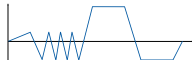

Procédé B (schéma)



Procédé N (schéma)



Procédé S (dental special)

Electricité


monophasé, 230 V, 10 Amp.

Niveau sonore

<60 dB

Validation

Les stérilisateur sont équipés de raccords pour les capteurs de température et de pression externes indépendants pour la validation, conformément à la norme EN554 et ISO17665 par exemple.

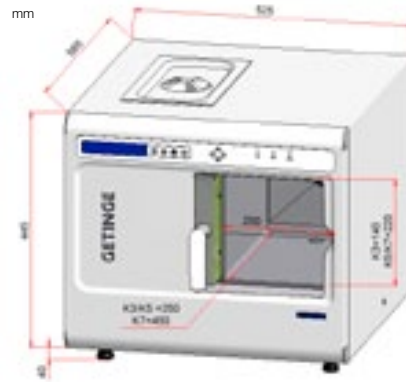

Volume de la chambre : / Charge max. (textiles) :

K3+ = 10 L / 3 kg (1,5 kg)

K5+ = 15 L / 5 kg (2,5 kg)

K7+ = 20 L / 7 kg (3,5 kg)

Raccordements à l'eau et conditions requises

Qualité de l'eau : distillée ou déminéralisée, max. 30 µS/cm

Consommation d'eau : environ 0,4 L/cycle

Volume du réservoir : 5 litres

Pression de l'eau : au moins 1,0 bar lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation en eau

Filtre de déminéralisation DS200

Capacité à 200 ppm : environ 520 litres


Montage mural.

Traçabilité

Par l'intermédiaire d'une imprimante, d'une unité de stockage USB ou d'un port série pour PC.



ACCESSOIRES

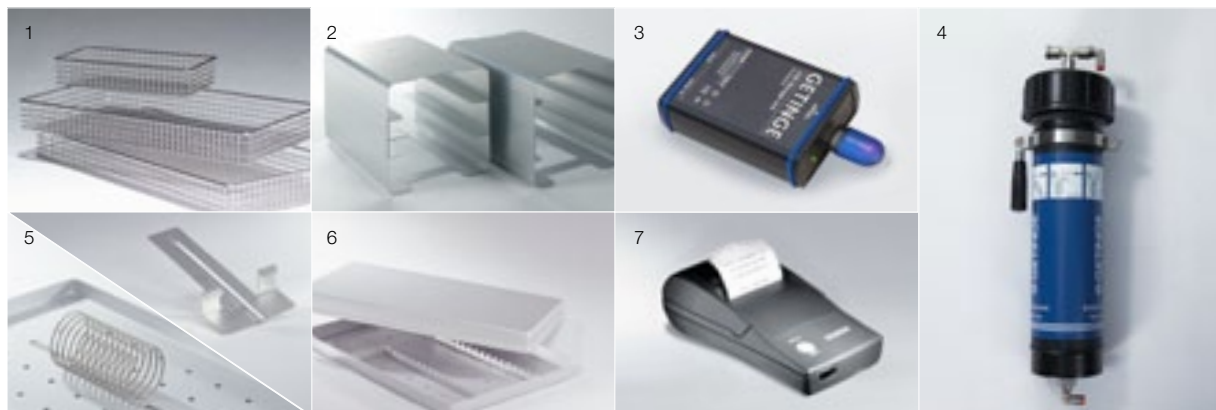

Une sélection d'accessoires pour les stérilisateur Getinge de la gamme K

1. Plateaux, 380x190x38 mm, 330x190x38 mm ou 100x190x38 mm
2. Supports pour cassette
3. Unité de stockage USB
4. Déminéralisateur DS200 pour le raccordement à une arrivée et à une évacuation d'eau
5. Support pour sachets (afin de faciliter le séchage des articles) / Poignée du plateau

6. Cassette dentaire, complète avec couvercle et mécanisme de fixation, 287x186x39 mm

7. Imprimante

Il existe de nombreux autres accessoires pour les stérilisateur Getinge de la gamme K. Consultez la brochure séparée. Consultez le site www.skarhamn.getinge.com ou demandez des informations à votre revendeur Getinge le plus proche.



SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS

Getinge est le leader mondial des solutions de nettoyage, désinfection et stérilisation en toute efficacité dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie. Nous nous engageons à aider nos clients à fournir de meilleurs soins à un coût moindre, et ce grâce à des solutions bien pensées et personnalisées. Nous sommes donc aux côtés de nos clients dès la conception architecturale et la formation, jusqu'au suivi et au service après-vente, grâce à des solutions complètes, un engagement à long terme et une présence mondiale. Getinge – Always with you

Getinge Skärhamn

Industrivägen 5
SE-471 31 Skärhamn
Tel: +46 304 60 02 00
Fax: +46 304 60 02 29
info@seska.getinge.com
www.skarhamn.getinge.com

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, GETINGE et MAQUET. **ArjoHuntleigh** se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. **GETINGE** propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. **MAQUET** se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales et aux soins intensifs.